

# Leitfaden für den Verbandwechsel



Nutzen Sie **Mepilex® Border Flex** für die Behandlung Ihrer Wunde.

## Anwendung:

1. Wunde gemäß geltender Richtlinien reinigen und vorbereiten. Wundumgebende Haut gründlich trocknen.
2. Mepilex® Border Flex so auf die Wunde applizieren, dass die gesamte Wunde abgedeckt ist und die wundumgebende Haut um mindestens 1-2 cm überlappt wird.

3. Mittlere Schutzfolie abziehen.



4. Applizieren Sie die haftende Seite auf der Wunde.



5. Entfernen Sie nun die seitlichen Schutzfolien und streichen die Seiten glatt.




Auf der Außenfolie sind Exsudat-Kontroll-Punkte zur Beobachtung, Dokumentation und Kontrolle der Exsudatausbreitung.



**Bsp. 4x4 cm.** Auf der Außenfolie des Schaumverbandes lässt sich ein wenig Flüssigkeit erkennen.



**Bsp. 8x10 cm.** Das Exsudat wird aufgenommen, von der Wunde weggeleitet und breitet sich im Schaumverband aus.

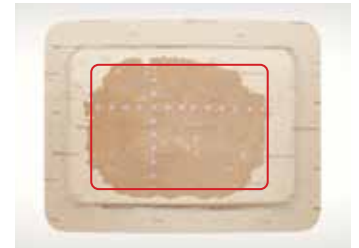

Ziehen Sie einen Verbandwechsel in Betracht, wenn sich das Exsudat den Rändern des Schaumverbandes nähert und eine Verbandsättigung bevorsteht.

## Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?  
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

### Bitte beachten Sie:

- ✓ Eine Verfärbung auf der Rückseite des Verbandes ist völlig normal.
- ✓ Der Verband kann, je nach Zustand der Wunde und der umliegenden Haut, bis zu sieben Tage lang getragen werden.
- ✓ Der Verband kann unter der Dusche getragen werden.
- ✓ Der Verband Mepilex® Border Flex ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden.

Mepilex® Border Flex Wundverbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mepilex® Border Flex, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0. Mölnlycke®, Mepilex® Border Flex sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0102

  
**Mölnlycke®**