

Leitfaden für den Verbandwechsel



Nutzen Sie **Mextra® Superabsorbent** für die Behandlung Ihrer Wunde.

Anwendung:

1. Wunde gemäß geltender Richtlinien reinigen und vorbereiten. Wundumgebende Haut gründlich trocknen.
2. Tragen Sie Mextra® Superabsorbent direkt auf den Wundbereich auf. Die weiße Seite des Verbandes liegt dabei auf der Wunde, die blaue Seite zeigt nach oben.



3. Mextra® Superabsorbent so auf die Wunde applizieren, dass die gesamte Wunde abgedeckt und die trockene Haut bedeckt ist.
4. Fixieren Sie den Verband, z. B. mit einem geeigneten Schlauchverband oder Klebeband.



Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie den Verband anlegen können. Scannen Sie hierfür einfach den Code mit Ihrem Handy oder besuchen Sie uns auf:



www.molnlycke.de/produkte-losungen/mextra-superabsorbent

Bitte beachten Sie:

- ✓ Schneiden Sie den Mextra® Superabsorbent Verband nicht zu.
- ✓ Der Mextra® Verband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

Mextra® Superabsorbent Verbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mextra® Superabsorbent Verbänden, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0. Molnlycke®, Mepilex® Border Flex sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
©2020 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DW00111


Molnlycke®