


# WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

**EINFACH. MACHEN.**  
Wundversorgung mit Mölnlycke®

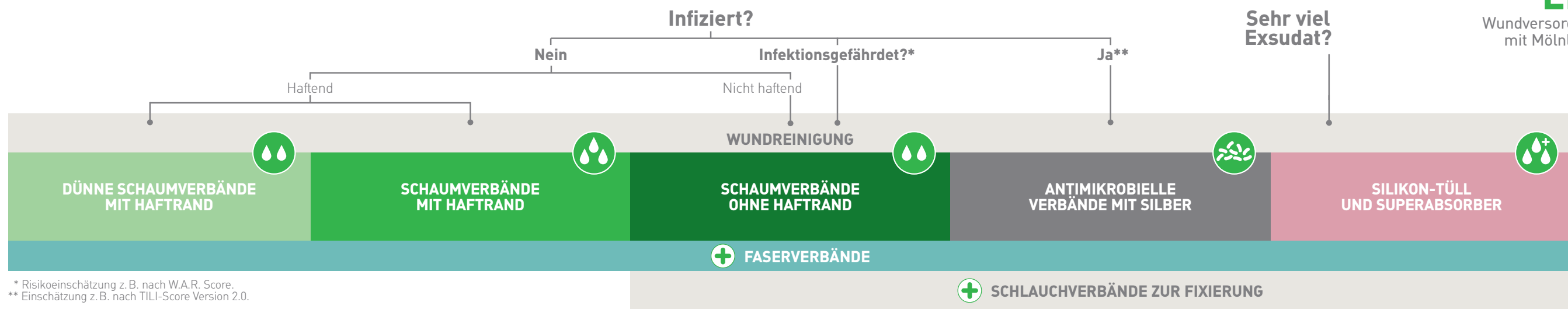

QR-CODE SCANNEN UND MEHR ERFAHREN:

\* Risikoeinschätzung z.B. nach W.A.R. Score.  
\*\* Einschätzung z.B. nach TILI-Score Version 2.0.

## PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase/Reinigungsphase			Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase
<b>Wundart/ Wundzustand</b>	Trockene, fibrinbelagte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z.B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation	Infektionsgefährdete oder infizierte oberflächliche Wunden	Infektionsgefährdete oder infizierte Wundhöhlen	Feuchte (oberflächliche) Wunden	Feuchte Wundhöhlen	Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung
<b>Beispiel</b>							
<b>Exsudation</b>	Nicht bis wenig	Mäßig bis stark	bis	Wenig bis mittel	bis	Nicht bis wenig	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufweichen der Beläge</li> <li>Wundreinigung</li> <li>Feuchthalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keimreduzierung</li> <li>Wundreinigung</li> <li>Exsudatmanagement</li> <li>Wundrandschutz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus</li> <li>Exsudatmanagement</li> <li>Schutz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutz</li> <li>Wundruhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutz</li> <li>Förderung der Elastizität</li> <li>Vorbeugung hypertropher Narbenbildung</li> </ul>
<b>Schmerzen minimieren</b>							
<b>Wundreinigung</b>	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen. Empfehlung: <b>Granudacyn®</b> Wundspüllösung						
<b>Sauerstoff-Therapie</b>	Wunden, deren Reduktion der Wundgröße innerhalb von 4 Wochen weniger als 40% beträgt: zusätzliche Verabreichung von <b>Granulox®</b>						
<b>Primärverband/ Wundfüller</b>	Granudacyn® Wundgel	Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + Granudacyn® Wundgel	bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Lite + Tubifast®	
<b>Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde</b>		Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag	Exufiber® Ag+ oder Melgisorb® Ag				Mepitel® Film Mepiform®
<b>Sekundärverband</b>	Mepilex® Lite	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® XT Mepilex®	Mextra®	Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT Mepilex®	Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film	
<b>Fixierung</b>	Tubifast®						

## LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN	VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A	CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS
Mepitel® One Mepitel® Mepilex® Transfer Mepilex® Transfer Ag + Mextra® Superabsorbent + Tubifast®	Mepilex® XT + Granudacyn® Wundgel Mepilex® Ag + Tubifast®	Mepilex® Border Post-OP Mepitel® Film	Mepilex® Lite Mepitel® Film	Mepitel® One

**UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE**

**Avance® Solo** Einweg-Unterdruck-Wundtherapie-System zur Entfernung von Exsudat aus chirurgischen (ciNPT), akuten und chronischen Wunden (dNPWT)

Batteriebetriebenes System mit einem kontinuierlichen Unterdruck von -125 mmHg und einer Lebensdauer von 14 Tagen



## SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Flex</b>			
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	5	50
59 53 50	10 x 10 cm	5	50
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	5	50
59 54 11	15 x 15 cm	10	100
59 56 11	15 x 20 cm	10	120
58 35 00	7,8 x 10 cm	5	50
58 33 00	13 x 16 cm	5	35
58 34 00	15 x 19 cm	5	45

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Flex Lite</b>			
58 10 50	4 x 5 cm	10	70
58 11 00	5 x 12,5 cm	5	65
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	5	70
58 13 50	10 x 10 cm	5	50
58 15 00	15 x 15 cm	5	50

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Sacrum</b>			
28 20 60	16 x 20 cm	5	25
28 24 60	22 x 25 cm	5	25

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Heel</b>			
28 27 10	22 x 23 cm	10	30

## SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® XT</b>			
21 10 15	5 x 5 cm	5	40
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5	50
21 12 10	10 x 21 cm	5	45
21 13 10	17,5 x 17,5 cm	5	25
21 14 10	21 x 22 cm	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	2	12

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex®</b>			
29 40 15	5 x 5 cm	5	40
29 41 00	10 x 10 cm	5	70
29 42 00	10 x 20 cm	5	45
29 43 00	15 x 15 cm	5	25
29 44 00	20 x 20 cm	5	20
29 45 00	20 x 50 cm	2	12

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Heel</b>			
28 81 00	13 x 20 cm	5	25

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Lite</b>			
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	5	30
28 45 00	20 x 50 cm	4	24

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Transfer</b>			
29 47 00	10 x 12 cm	5	50
29 48 00	15 x 20 cm	5	40
29 45 02	20 x 50 cm	4	24

## FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepitel® Film</b>			
29 61 70	6 x 7 cm	10	50
29 62 70	10 x 12 cm	10	70
29 64 70	10 x 25 cm	10	50
29 66 70	15 x 20 cm	10	70

## ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Ag</b>			
28 71 10	10 x 10 cm	5	70
28 72 10	10 x 20 cm	5	45
28 73 10	15 x 15 cm	5	25
28 74 10	20 x 20 cm	5	20
28 75 10	20 x 50 cm	2	12

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Heel Ag</b>			
38 81 00	13 x 20 cm	5	25
38 83 00	15 x 22 cm	5	30

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Ag</b>			
39 52 60	7 x 7,5 cm	5	70
39 53 60	10 x 12,5 cm	5	50
39 54 60	15 x 17,5 cm	5	35
39 56 60	17 x 20 cm	5	40
39 58 00	10 x 20 cm	5	35
39 57 00	10 x 25 cm	5	35
39 59 00	10 x 30 cm	5	25

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Sacrum Ag</b>			
38 20 00	18 x 18 cm	5	40
38 22 00	20 x 20 cm	5	40
38 24 00	23 x 23 cm	5	25

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Transfer Ag</b>			
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10	70
39 47 00	12,5 x 12,5 cm	5	50
39 48 00	15 x 20 cm	10	50
39 45 00	20 x 50 cm	2	12

## CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepilex® Border Post-Op</b>			
49 61 00	6 x 8 cm	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	10	100
49 64 00	10 x 20 cm	10	120
49 64 50	10 x 25 cm	10	60
49 66 00	10 x 30 cm	10	40
49 66 50	10 x 35 cm	5	55

## WUNDDISTANZGITTER / SILIKON-TÜLL

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepitel®</b>			
29 05 10	5 x 7,5 cm	10	50
29 07 10	7,5 x 10 cm	10	40
29 10 10	10 x 18 cm	10	70
29 20 05	20 x 30 cm	5	30

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepitel® One</b>			
<b>Mit Abziehhilfe</b>			
28 91 00	5 x 7,5 cm	10	70
28 91 70	6 x 7 cm	5	70
<b>Ohne Abziehhilfe</b>			
28 93 00	7,5 x 10 cm	10	40
28 92 70	9 x 10 cm	5	50
28 95 00	10 x 18 cm	10	70
28 94 70	13 x 15 cm	5	50
28 97 00	17 x 25 cm	5	40
28 97 50	27,5 x 50 cm	2	14

Sofern nicht anders aufgeführt, sind alle Produkte einzeln steril verpackt.

## FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	Stück/ Karton
<b>Tubifast® 10 m Länge, auf Rolle – unsteril</b>			
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	1

## GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Exufiber®</b>			
70 99 00	5 x 5 cm	10	40
70 99 01	10 x 10 cm	10	80
70 99 03	15 x 15 cm	10	60
70 99 04	20 x 30 cm	5	25
70 99 05	4,5 x 10 cm	10	40
70 99 06	4,5 x 20 cm	10	50
70 99 07	4,5 x 30 cm	10	60
<b>Tamponaden</b>			
70 99 08	1 x 45 cm	5	25
70 99 09	2 x 45 cm	5	25

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Exufiber® Ag+</b>			
60 34 01	5 x 5 cm	10	40
60 34 02	10 x 10 cm	10	60
60 34 03	15 x 15 cm	10	60
60 34 04	4,5 x 10 cm	10	40
60 34 05	4,5 x 20 cm	10	50
60 34 06	4,5 x 30 cm	10	60
60 34 07	20 x 30 cm	5	20
<b>Tamponade</b>			
60 34 00	2 x 45 cm	5	20

## UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Avance® Solo</b>			
888 00 50	Avance® Solo Pumpe / Starter Set	1	2
88 10 20	Avance® Solo Wundverband 10 x 20 cm	2	4
88 10 30	Avance® Solo Wundverband 10 x 30 cm	2	4
88 10 35	Avance® Solo Wundverband 10 x 35 cm	2	4
88 15 15	Avance® Solo Wundverband 15 x 15 cm	2	4
88 15 20	Avance® Solo Wundverband 15 x 20 cm	2	4
88 15 30	Avance® Solo Wundverband 15 x 30 cm	2	4
88 20 20	Avance® Solo Wundverband 20 x 20 cm	2	4
88 25 25	Avance® Solo Wundverband 25 x 25 cm	2	4
88 20 00	Avance® Solo / Adapt Wundfüller	4	8
88 00 50	Avance® Solo / Adapt Kanister (50 ml)	4	8
888 10 20	Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 20 cm – ciNPT	1	2
888 10 30	Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 30 cm – ciNPT	1	2
888 10 35	Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 35 cm – ciNPT	1	2
999 41 52	Avance® Solo Adapt Set: Pumpe inkl. Filmverband u. Wundfüller – dNPWT	1	2
99 41 52	Avance® Solo Adapt Filmverbandset 20 x 27 cm – dNPWT	5	5
99 40 00	Avance® Solo Adapt Filmverband 20 x 27 cm – dNPWT	5	10

## NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mepiform®</b>			
29 36 00	4 x 30 cm	5	50
29 37 00	5 x 7,5 cm	5	25
29 38 00	10 x 18 cm	5	35

Erfahren Sie mehr unter [www.moelnycke.de](http://www.moelnycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel. +49 211 920 88-0, Fax +49 211 920 88-170  
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2022 Mölnlycke Health Care AB.  
Alle Rechte vorbehalten.  
DWC0090

Stand: August 2022

**Mölnlycke®**

## SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Mextra® Superabsorbent</b>			
61 07 00	10 x 10 cm	10	50
61 07 10	10 x 15 cm	10	40
61 07 20	10 x 20 cm	10	90
61 07 30	15 x 20 cm	10	40
61 07 40	20 x 25 cm	10	40
61 07 50	20 x 30 cm	10	50
61 07 60	20 x 40 cm	10	50

## ALGINATE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Melgisorb® Plus*</b>			
25 20 00	5 x 5 cm	10	100
25 22 00	10 x 10 cm	10	100
25 25 00	10 x 20 cm	10	100
<b>Tamponade</b>			
25 35 00	3 x 45 cm	5	50

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Melgisorb® Ag</b>			
25 60 55	5 x 5 cm	10	100
25 61 05	10 x 10 cm	10	100
25 61 55	15 x 15 cm	10	100
<b>Tamponade</b>			
25 66 05	3 x 44 cm	10	100

## SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
<b>Granulox® Hämoglobin-Spray*</b>			
360001	12 ml/ca. 30 Anwendungen	09 50 57 53	6

## WUNDREINIGUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Stück/ Karton
<b>Granudacyn® Wundspüllösung und Gel*</b>			
36 01 50	Wundspüllösung 50 ml	50 ml	20
36 01 00	Wundspüllösung 250 ml	250 ml	15
36 01 01	Wundspüllösung 500 ml	500 ml	12
36 01 02	Wundspüllösung 1000 ml	1000 ml	6
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500 ml	500 ml	12
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000 ml	1000 ml	6
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	12
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	12
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	15

## WUNDVERSORGUNG