


WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

EINFACH. MACHEN.
Wundversorgung mit Mölnlycke®

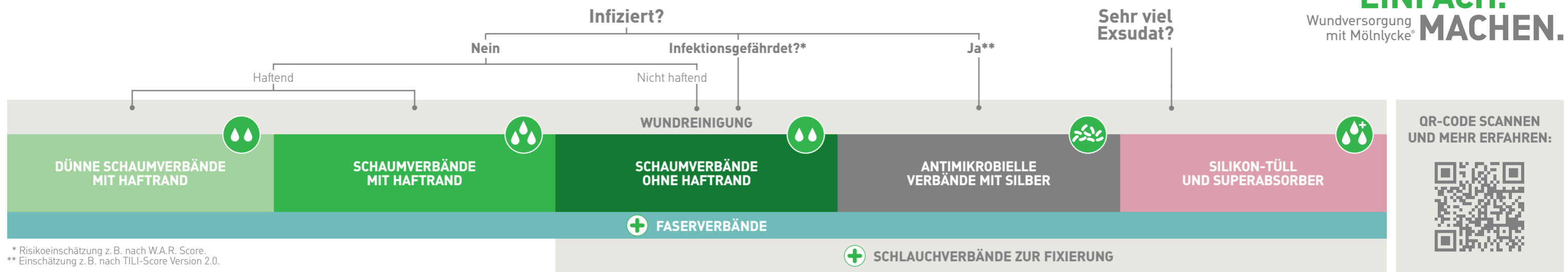

* Risikoeinschätzung z.B. nach W.A.R. Score.
** Einschätzung z.B. nach TILI-Score Version 2.0.

PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase / Reinigungsphase			Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelagte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z.B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation			Feuchte (oberflächliche) Wunden		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebstabilisierung
Beispiel							
Exsudation	Nicht bis wenig			Wenig bis mittelstark		Nicht bis wenig	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Aufweichen der Beläge Wundreinigung Feuchthalten 			<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus Exsudatmanagement Schutz 		<ul style="list-style-type: none"> Schutz Wundruhe 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz Förderung der Elastizität Vorbeugung hypertropher Narbenbildung
Schmerzen minimieren							
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen. Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung						
Sauerstoff-Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgröße innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox®						
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel	Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + Granudacyn® Wundgel	bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Lite + Tubifast®	
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde		Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag	Exufiber® Ag+ oder Melgisorb® Ag				Mepitel® Film Mepiform®
Sekundärverband	Mepilex® Lite	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® XT	Mextra®	Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT	Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film	
Fixierung	+Tubifast®						



LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN	VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A	CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS
Mepitel® One Mepitel® Mepilex® Transfer Mepilex® Transfer Ag + Mextra® Superabsorbent + Tubifast®	Mepilex® XT Granudacyn® Wundgel Mepilex® Ag + Tubifast®	Mepilex® Border Post-OP Mepitel® Film	Mepilex® Lite Mepitel® Film	Mepitel® One

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Border Flex			
59 52 60	7,5 x 7,5 cm	12 59 59 84	10
59 53 60	10 x 10 cm	12 59 60 09	10
59 50 60	12,5 x 12,5 cm	12 59 60 15	10
59 54 11	15 x 15 cm	12 59 60 21	10
59 56 11	15 x 20 cm	12 59 60 38	10
59 58 00	10 x 20 cm	17 14 62 16	10
59 59 00	10 x 30 cm	17 14 62 39	10
58 35 00	7,8 x 10 cm	14 41 21 43	5
58 33 00	13 x 16 cm	14 41 21 95	5
58 34 00	15 x 19 cm	14 41 22 03	5

Mepilex® Border Flex Lite

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
58 10 60	4 x 5 cm	16 22 64 91	10
58 11 00	5 x 12,5 cm	16 22 65 22	5
58 12 60	7,5 x 7,5 cm	16 22 65 16	5
58 13 60	10 x 10 cm	16 22 65 39	5
58 15 00	15 x 15 cm	16 22 65 45	5

SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® XT			
21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5
21 13 00	15 x 15 cm	07 05 23 59	5
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele:



Mepilex®

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
29 40 15	5 x 5 cm	09 31 30 54	5
29 41 50	10 x 12 cm	01 60 33 38	5
29 42 50	12 x 20 cm	01 60 33 50	5
29 43 50	15 x 17 cm	01 60 33 73	5
29 44 50	20 x 22 cm	01 60 34 04	5
29 45 00	20 x 50 cm	01 16 68 14	2

Mepilex® Heel

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5

Mepilex® Lite

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4

Mepilex® Transfer

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
29 47 00	10 x 12 cm	04 04 79 32	5
29 48 00	15 x 20 cm	02 52 35 41	5
29 45 02	20 x 50 cm	09 89 16 73	4

FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepitel® Film			
29 61 70	6 x 7 cm	04 10 73 38	10
29 62 70	10 x 12 cm	04 10 73 50	10
29 64 70	10 x 25 cm	04 10 73 73	10
29 66 70	15 x 20 cm	04 10 74 04	10

ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Ag			
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2

Mepilex® Heel Ag

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5

Mepilex® Border Ag

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
39 52 60	7 x 7,5 cm	01 41 04 38	5
39 53 60	10 x 12,5 cm	01 41 69 49	5
39 54 60	15 x 17,5 cm	01 41 69 78	5
39 56 60	17 x 20 cm	01 43 22 91	5
39 58 00	10 x 20 cm	06 13 03 99	5
39 57 00	10 x 25 cm	06 13 04 07	5
39 59 00	10 x 30 cm	06 13 04 13	5

Mepilex® Border Sacrum Ag

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
38 20 00	18 x 18 cm	06 13 04 36	5
38 22 00	20 x 20 cm	06 13 04 42	5
38 24 00	23 x 23 cm	06 13 04 59	5

Mepilex® Transfer Ag

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	09 54 27 77	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	09 54 27 83	5
39 48 00	15 x 20 cm	09 54 28 14	10
39 45 00	20 x 50 cm	09 54 28 20	2

CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepilex® Border Post-Op			
49 61 00	6 x 8 cm	11 63 91 13	10
49 62 00	9 x 10 cm	11 63 91 36	10
49 63 00	10 x 15 cm	11 63 91 42	10
49 64 05	10 x 20 cm	11 63 91 59	5
49 64 55	10 x 25 cm	11 63 91 65	5
49 66 05	10 x 30 cm	11 63 91 71	5
49 66 50	10 x 35 cm	11 63 91 88	5

SILIKON-TÜLL

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepitel®			
29 05 00	5 x 7 cm	02 81 84 43	5
29 07 00	8 x 10 cm	02 81 84 72	5
29 10 00	12 x 15 cm	02 81 85 03	5
29 20 05	20 x 30 cm	04 66 04 72	5

Mepitel® One

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mit Abziehhilfe			
28 91 70	6 x 7 cm	14 33 30 99	5
28 92 70	9 x 10 cm	14 33 31 07	5
28 94 70	13 x 15 cm	14 33 31 13	5
Ohne Abziehhilfe			
28 91 00	5 x 7,5 cm	03 08 97 27	10
28 93 00	7,5 x 10 cm	03 09 00 15	10
28 95 00	10 x 18 cm	09 50 47 59	10
28 97 00	17 x 25 cm	09 50 84 50	5
28 97 50	27,5 x 50 cm	11 02 88 46	2
Spenderbox			
28 91 10	6 x 7 cm	16 26 10 79	70
28 92 10	9 x 10 cm	16 26 10 85	70

FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedermaße	PZN Packung	PZN Stück	Stück/ Packung
Tubifast®					
10 m Länge, auf Rolle – unsteril					
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	09 93 26 91	---	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	09 93 27 16	---	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	09 93 27 39	---	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	09 93 27 45	---	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	09 93 27 68	---	1
1 m Länge, einzeln verpackt					
24 80	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	09 93 27 74	00 14 35 38	12
24 81	Grün (5 cm)	14–24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28	12
24 82	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40	12
24 79	Violett (20 cm)	64–130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57	12

GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Exufiber®			
70 99 00	5 x 5 cm	14 02 16 61	10
70 99 01	10 x 10 cm	14 02 16 78	10
70 99 03	15 x 15 cm	14 02 16 84	10
70 99 04	20 x 30 cm	14 03 93 13	5
70 99 05	4,5 x 10 cm	14 03 93 36	10
70 99 06	4,5 x 20 cm	14 02 16 90	10
70 99 07	4,5 x 30 cm	14 03 93 42	10
Tamponade			
70 99 08	1 x 45 cm	14 02 17 15	5
70 99 09	2 x 45 cm	14 02 17 09	5

Exufiber® Ag+

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
60 34 01	5 x 5 cm	14 02 16 03	10
60 34 02	10 x 10 cm	14 02 16 32	10
60 34 03	15 x 15 cm	14 02 16 49	10
60 34 04	4,5 x 10 cm	14 03 93 59	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	14 03 93 65	10
60 34 06	4,5 x 30 cm	14 03 93 71	10
60 34 07	20 x 30 cm	14 02 16 55	5
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	14 02 15 95	5

NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mepiform®			
29 36 00	4 x 30 cm	00 08 91 87	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	08 65 55 74	5
29 38 00	10 x 18 cm	08 65 55 97	5

Sofern nicht aufgeführt, sind alle Produkte steril – einzeln verpackt.

Die aufgeführten Verbände können aktuell im Rahmen der Erstattung zulasten der GKV verordnet werden. Ausgenommen sind Granudacyn® Wundspüllösung, Granulox® und Mepiform®.

* Aktuelle Informationen zur Erstattungsfähigkeit finden Sie unter www.molnlycke.de/unsere-expertise/verbandmitteldefinition

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel. +49 211 920 88-0, Fax +49 211 920 88-170
Der Name Molnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2022 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
DWC0090

Stand: April 2023



SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Mextra® Superabsorbent			
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	12 51 30 87	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	12 51 31 01	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	12 51 31 18	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	12 51 31 24	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	12 51 31 53	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	12 51 31 76	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	12 51 31 82	10

ALGINATE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Melgisorb® Plus*			
25 20 00	5 x 5 cm	09 93 26 56	10
25 22 00	10 x 10 cm	09 93 26 62	10
25 25 00	10 x 20 cm	09 93 26 79	10
Tamponade			
25 35 00	3 x 45 cm	09 93 26 85	5

Melgisorb® Ag

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
25 60 55	5 x 5 cm	01 56 08 24	10
25 61 05	10 x 10 cm	01 56 08 30	10
25 61 55	15 x 15 cm	01 56 08 47	10
Tamponade			
25 66 05	3 x 44 cm	01 56 09 59	10

SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Granulox® Hämoglobin-Spray*			
360001	12 ml/ca.		