

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Mepilex[®] Up

Ermöglicht ein Leben mit weniger Leckagen.^{1,2}

- mit innovativen Saugfähigkeiten und einzigartiger Exsudatverteilung im Verband – entgegen der Schwerkraft¹⁻⁵
- ermöglicht eine bessere Flüssigkeitsaufnahme als andere Schaumverbände*⁴
- bietet ein zuverlässiges Exsudatmanagement über mehrere Tage^{1,2,5,6}
- absorbiert sowohl dünnflüssiges als auch hochvisköses Exsudat⁵
- kann für eine Vielzahl von exsudierenden Wunden in allen Heilungsphasen verwendet werden¹



* Vergleich durch Labortests von Smith & Nephew Allevyn Gentle, Coloplast Biatain[®] Silicone NB, Convatec Aquacel[®] Foam, Essity Cutimed[®] Siltec[®], nach EN13726:2023 annex E.

Anwendung am Bein



Anwendung am Fuß



Anwendung am Zeh als Kreuz



Anwendung am Zeh



Anwendung an der Ferse



Anwendung am Ellbogen



Anwendung am Finger



Falls erforderlich, fixieren Sie Mepilex® Up mit einem Schlauchverband oder einer anderen Fixierung.

Safetac®-Technologie: Weniger Schädigung – Weniger Schmerzen.

Safetac® ist eine Kontaktschicht mit Silikonhaftung, die neues Gewebe und intakte Haut schützt, sodass Wunden ungestört bleiben und eine schnellere natürliche Heilung unterstützt wird. Die Versiegelung der Wundränder hilft, eine Mazeration zu verhindern^{7,8}. Die Kombination aus weniger Schmerzen und geringeren Hautschäden ist der Grund dafür, dass mehrere randomisierte Studien einen Verband mit Safetac® mit einer schnelleren Heilung⁹⁻¹² und geringeren Gesamtkosten für die Wundbehandlung¹² in Verbindung bringen.



Ohne Safetac®



Mit Safetac®

* Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Produktinformationen oder besuchen Sie www.molnlycke.de/mepilexup



Weitere Informationen finden Sie unter molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf Telefon + 49 211 920 880, Fax +49 211 920 88 170, info.de@molnlycke.com. Die Marken Mölnlycke, Mepilex und Safetac sowie die Namen und entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2024 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC0204

ML_1588_0

